



Din rygstærke partner

Produktdatablad

Medicinsk mundbind med øreelastikker, Type IIR varenr. 622-1000



Beskrivelse:

Mundbind med bløde og stærke øreelastikker samt næseklemme, der sikrer god pasform. Mundbind har en lav respirationsmodstand samt høj bakteriefiltrering. Ansigtmasken har ultrasonic sømme og er steril.

Materiale: PP, spandex, aluminium

Anvendelse:

Mundbind anbefales til brug af sundhedsfagligt personale i operationsstuer eller i omgivelser med lignende hygiejne krav for at mindske krydskontaminering. Mundbind benyttes i de situationer hvor der er ingen risiko for sprøjt og stænk. Patient og omgivelserne beskyttes imod smitte.

Form næseklemme og anbring mundbindet på ansigtet, sørg for at dække næsen og munden. Sæt øreelastikkerne rundt om ørerne. Mundbindet påtages med det farvede lag yderst og foldes altid helt ud. Øreelastikkerne gør det let at bære samt fjerne.

CE & Standarder

CE-mærket iht. EU Regulativet for medicinsk udstyr (MDR) 2017/745 Annex VIII, Klasse 1.

Type II godkendt i henhold til EN 14683:2019.

Test og krav ift. medicinsk ansigtmasker

EN 14683:2019			
Klassificering	Type 1 ^a	Type II	Type IIR
Bakteriel filtreringseffektivitet (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Respirationsmodstand (Pa/cm ²)	< 29,4	< 29,4	< 60
Væskegennemtrængning (kPa)	Kræves ikke	Kræves ikke	≥ 16,0
Mikrobiel renhed (CFU/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

a. Type I medicinske masker bør kun anvendes til patienter og andre personer for at mindske risikoen for spredning af infektioner i tilfælde af epidemi eller pandemi. Type I masker er ikke tiltænkt at blive anvendt af sundheds- og sygehuspersonale på en operationsstue eller andre medicinske områder med tilsvarende krav.

Forpakning:

Inderforpakning: dispenserboks Yderforpakning: Karton

Opbevaringsinstruktioner, holdbarhed og bortskaffelse af emballage

Chiroform A/S • Mariendalsvej 22 • 8800 Viborg
Tlf. 86613611 • E-mail: chiroform@chiroform.dk • www.chiroform.dk



Din rygstærke partner

Produktdatablad

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Holdbarhed - uåbnet: 3 år


Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes

Varenr.	Produkt	Str.	Kvalitet	Stk. pr. pk/kil
622-1000	Mundbind med øreelastikker, Type IIR	17x18 cm	3-lags	50/2000

Brugervejledning




1 Vask hænder inden mundbindet tages på.

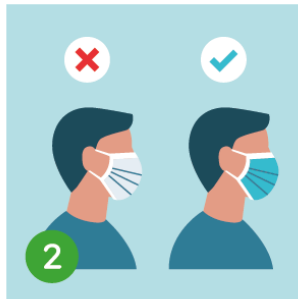

2 Sørg for, at mundbindets blå side vender udad.




3 Find metalstriben og placer den på næseryggen.

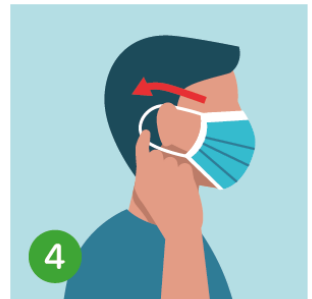

4 Fastgør elastikbåndene bag begge ører.




5 Dæk næse og mund helt. Der må ikke være mellemrum i siderne.

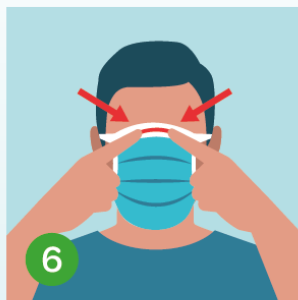

6 Tryk metalstriben ned, så den sidder fast på næsen.



7 Rør ikke mundbindet under brug. Vask hænder, hvis du gør.

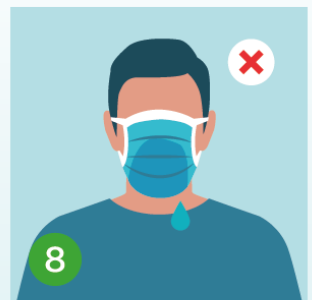

8 Udskift mundbindet, hvis det bliver fugtigt. Genbrug ikke.